

# BLAST® BANDAGE

Č. části: **BLAST** Č. NSN: **6510-01-586-4314**  
PATENT USA - 7,663,015



## POKYNY K POUŽITÍ

**Při použití obvazu na rány na končetinách**  
DODRŽUJTE KROKY 1-3

1



Umístěte poraněnou končetinu  
do středu podložky na ránu

2



Přeložte podložku na ránu  
na končetině

3



Zajistěte podložku na ránu elastickým obvazem

## POKYNY K POUŽITÍ

**Při použití obvazu na rány na břicho**  
DODRŽUJTE KROKY 1b-3b

1b



Vyjměte ze sáčku okluzivní  
vrstvu

2b



Překryjte ránu okluzivní  
vrstvou

3b



Překryjte podložkou na ránu a zajistěte elastickým obvazem



TACTICAL MEDICAL SOLUTIONS, LLC

TELEFONNÍ ČÍSLO 864.224.0081  
BEZPLATNÉ ČÍSLO 1.888.822.6331  
FAX 864.224.0064  
E-MAIL info@tacmedsolutions.com  
WEBOVÉ STRÁNKY tacmedsolutions.com  
1250 Harris Bridge Road, Anderson, SC 29621