

## FIXAČNÍ ŘEMENY



Zafixujte pacienta na nosítka s jednotlivými odpovídajícími barevně označenými fixačními řemeny. Tažením za konec každého fixačního řemene jej napínejte, dokud řemen nebude pevně přiléhat k tělu pacienta.

Foxtrot® propojením spon

## FIXACE ZRANĚNÉ OSOBY

### ZRANĚNÁ OSOBA V BEZVĚDOMÍ

Zraněnou osobu v bezvědomí lze zafixovat vedením řemene pro fixaci hrudníku přes paže. Řemeny pro fixaci hlavy poté připevněte k řemenu pro fixaci hrudníku. Tím dojde k nadzvednutí přední části nosítek a ochraně tažených nosítek před nárazy. Ruce zraněné osoby poté zafixujte pomocí řemene pro fixaci pasu. Výzbroj a výstroj zraněné osoby je možné uložit mezi její nohy.

1

2

### ZRANĚNÁ OSOBA PŘI VĚDOMÍ

Zraněnou osobu při vědomí lze zafixovat vedením řemene pro fixaci hrudníku pod pažemi, což osobě umožní i nadále manipulovat se zbraní. Řemeny pro fixaci hlavy jsou vedeny stejně jako v případě zraněné osoby v bezvědomí.



3

### FIXACE NOHOU


Řemen pro fixaci nohou je třeba zajistit jednou ze dvou metod pro zajištění spony. Smyčky pro fixaci nohou se používají v případě, že přesun nebo tažení zraněné osoby bude probíhat delší dobu. Tyto řemeny není nutné používat u všech zraněných osob.



4

### PŘÍPRAVA ŘEMENE PRO TAŽENÍ

Řemen pro tažení se nachází v horní části nosítek. Řemen pro tažení připravíte odkrytím ochranného pruhu a rozepnutím všech suchých zipů.

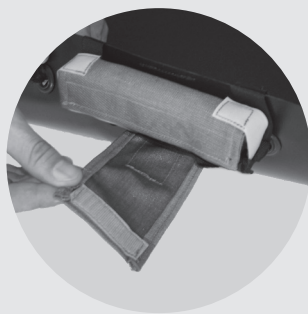

5

Řemen pro tažení vytáhněte celý z pouzdra. Linku je nyní možné použít k tažení nosítek. Chcete-li uskladnit řemen pro tažení, doporučuje se jej překládat ve tvaru S, který usnadní jeho příští přípravu.



## USKLADNĚNÍ

1

Nosítka určená k uskladnění srolujte směrem od spodní strany k hlavě s řemeny založenými dovnitř a madly ven. Řemeny pro fixaci hlavy ponechte venku a roztažené. Budou použity k zajištění srolovaných nosítek.



2

Řemeny pro fixaci hlavy obtočte kolem nosítek a zajistěte je tak k uskladnění. K utažení nosítek položte ruku na jejich střed a začněte s rolováním. Řemeny pro fixaci hlavy znovu utáhněte a založte do poutka.



**VAŠE VÝSTROJ NENÍ MÍSTEM PRO KOMPROMIS.**



TACTICAL MEDICAL SOLUTIONS', LLC

TELEFONNÍ ČÍSLO 864.224.0081

BEZPLATNÉ ČÍSLO 1.888.822.6331

FAX

864.224.0064

E-MAIL

info@tacmedsolutions.com

WEBOVÉ STRÁNKY tacmedsolutions.com

1250 Harris Bridge Road, Anderson, SC 29621, USA