


FIXAČNÍ ŘEMENY

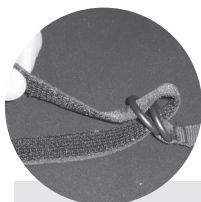

Metoda 1

Metoda 2



Metoda 1 se doporučuje pro případ delšího přesunu pacienta nebo pro případ, kdy lze očekávat obtížnější terén. **Metodu 2** lze použít v případě potřeby rychlé evakuace nebo minimalizace cílového času. Fixační řemeny lze v libovolné části připevnit jeden k druhému.

FIXACE ZRANĚNÉ OSOBY

ZRANĚNÁ OSOBA V BEZVĚDOMÍ

Zraněnou osobu v bezvědomí lze zafixovat vedením řemene pro fixaci hrudníku přes paže. Řemeny pro fixaci hlavy poté připevníte k řemeni pro fixaci hrudníku. Tím dojde k nadzvednutí přední části nosítek a ochraně tažených nosítek před nárazy. Ruce zraněné osoby poté zafixujete pomocí řemene pro fixaci pasu. Výzbroj a výstroj zraněné osoby je možné uložit mezi její nohy.

1

2

ZRANĚNÁ OSOBA PŘI VĚDOMÍ

Zraněnou osobu při vědomí lze zafixovat vedením řemene pro fixaci hrudníku pod pažemi, což osobě umožní i nadále manipulovat se zbraní. Řemeny pro fixaci hlavy jsou vedeny stejně jako v případě zraněné osoby v bezvědomí.



3

FIXACE NOHOU

Řemen pro fixaci nohou je třeba zajistit jednou ze dvou metod pro zajištění D kroužku. Smyčky pro fixaci nohou se používají v případě, že přesun nebo tažení zraněné osoby bude probíhat delší dobu. Tyto řemeny není nutné používat u všech zraněných osob.



4

PŘÍPRAVA ŘEMENE PRO TAŽENÍ

Řemen pro tažení se nachází v horní části nosítek. Řemen pro tažení připravíte odkrytím ochranného pruhu a rozepnutím všech suchých zipů.



5

Řemen pro tažení vytáhněte celý z pouzdra. Linku je nyní možné použít k tažení nosítek. Chcete-li uskladnit řemen pro tažení, doporučuje se jej překládat ve tvaru S, který usnadní jeho příští přípravu.



USKLADNĚNÍ

1

Nosítka určená k uskladnění srolujte směrem od spodní strany k hlavě s řemeny založenými dovnitř a madly ven. Řemeny pro fixaci hlavy ponechte venku a roztažené. Budou použity k zajištění srolovaných nosítek.



2

Řemeny pro fixaci hlavy obtočte kolem nosítek a zajistěte je tak k uskladnění. K utažení nosítek položte ruku na jejich střed a začněte s rolováním. Řemeny pro fixaci hlavy znovu utáhněte a založte do pouška.



**VAŠE VÝSTROJ NENÍ MÍSTEM PRO
KOMPROMIS.**



TACTICAL MEDICAL SOLUTIONS', LLC

TELEFONNÍ ČÍSLO 864.224.0081

BEZPLATNÉ ČÍSLO 1.888.822.6331

FAX 864.224.0064

E-MAIL info@tacmedsolutions.com

WEBOVÉ STRÁNKY tacmedsolutions.com

1250 Harris Bridge Road, Anderson, SC 29621, USA