

ŠKRTIDLO SOF®

Č. části: **84-0009** | Skladové číslo NATO: **ČEKÁ NA VYŘÍZENÍ**

US PATENT-8,303,620 a D649,642 a 7 776 064

POKYNY K POUŽITÍ


Postup použití škrtidla

1




Nasuňte na končetinu

2

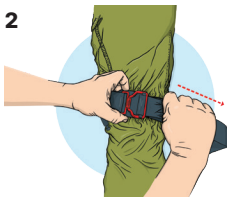

Pevně zatáhněte konec

3

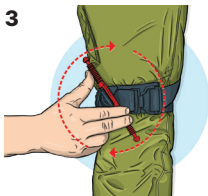

Otočte rukojeť

4



Zajistěte sponku

5



Zajistěte trojúhelníkem

6



Zaznamenejte čas

Postup použití škrtidla, pokud nelze nasadit na končetinu
Postupujte dle kroků 1b–4b



1b




Zvedněte přezku

2b



Otočením odpojte

3b

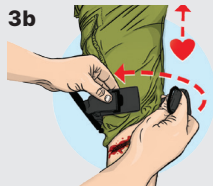

Obmotejte kolem končetiny

4b



Zapněte přezku, poté přejděte ke kroku 2

Škrtidlo SOF®
Ke kontrole těžkého krvácení.

Skladování škrtidla SOF®

Škrtidlo skladujte se zapnutou přezkou a dostatečně volně na to, aby bylo možné jeho oko nasadit na končetinu.



TACTICAL MEDICAL SOLUTIONS, LLC

TELEFONNÍ ČÍSLO 864 224 0081

BEZPLATNÉ ČÍSLO 1.888.822.6331

FAX 864.224.0064

E-MAIL info@tacmedsolutions.com

WEBOVÉ STRÁNKY tacmedsolutions.com

1250 Harris Bridge Road, Anderson, SC 29621, USA

CE 1984