

Varivac - Nastavitelný systém vakuové drenáže rány s multikonektorem s/bez PVC drénu a trokaru

Nastavitelný systém drenáže rány s nízkým podtlakem

- s předvakuovanou nádobkou 500 ml
- s PVC drémem a trokarem nebo bez nich
- se zpětným ventilem
- s nastavitelným regulátorem podtlaku
(Approx) 0kPa ~ 15kPa or
0mmHg ~ 113mmHg.

Sterilní hadičky, součástí a vnější kanystr. Nepoužívejte, pokud je obal poškozený.

Opakované vysávání kanystru

Ztráta podtlaku neznamená, že je nádobka vadná, protože ji lze kdykoli znovu vysát (i když je připojena k pacientovi).

Chcete-li provést opětovné vakuování, musíte nejprve uzavřít jednu posuvnou svorku (kanystr nebo FlexTube), poté sejmut kryt portu Revac a aplikovat nemocniční sání po dobu přibližně 5 sekund, nebo když jsou uši indikátoru vaku zcela zkřížené.

Další pokyny k opětovnému vysávání kanystru viz www.varivac.com/education

Nastavení operačního sálu


1. Vložte drenážní hadičku viz www.varivac.com/education
2. Znovu ořízněte oříznutou stranu multikonektoru na správnou velikost, zatažte vypouštěcí hadici na multikonektor (zajistíte pevné usazení).
3. Připojte hadici a nádobku pomocí jejich Luer konektorů na ventilu Duckbill Valve.
4. Otevřete posuvnou svorku na kanystru a aktivujte drenáž.
5. Zkontrolujte trubici pro průtok exsudátu.
6. Po zahájení vypouštění upravte úroveň podtlaku na požadované nastavení.
7. Viz www.varivac.com/education

Odstranění drenážního systému

1. Nastavte volič regulátoru do pasivní polohy „P“.
2. Nechte systém odpočinout pouze 5 minut
3. Zavřete posuvnou svorku na kanystru a vyjměte ji jako kompletní systém bez odpojení jakékoli části.
4. **POZNÁMKA:** v žádné fázi demontáže není nutné kanystr vysávat.
5. Nepoužívejte je opakovaně, jinak může dojít ke křížové kontaminaci.
6. Likvidace podle nemocničního protokolu.
7. Viz www.varivac.com/education

Kódy produktu

VC500-02, VC500-03, VC500-04, VC500-11 & VC500-12

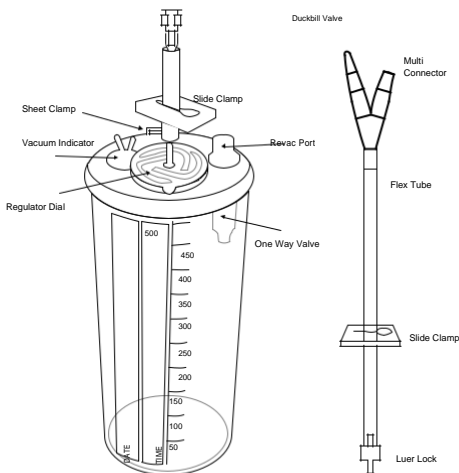

Výměna láhve/zásobníku

1. Chcete-li vyměnit kanystr, musíte nejprve zavřít obě posuvné svorky. (Kanystr a ohebná trubka)
2. Otevřete nové sterilní balení VC500-12 Varivac.
3. Vyměňte nový kanystr za starý odpojením a opětovným připojením na jejich konektorech Luer Lock u Duckbillova ventilu.
4. Otevřete posuvnou svorku na kanystru a ohebné trubici, abyste aktivovali odvodnění.
5. Zkontrolujte průtok exsudátu trubici.
6. Po zahájení vypouštění nastavte úroveň podtlaku na požadované nastavení.
7. Použitý kanystr zlikvidujte podle nemocničního protokolu.
8. Viz www.varivac.com/education



Na jedno použití



Nepoužívejte, pokud je obal poškozený



Datum výroby



Žádné ostré předměty



Použití do



Viz návod k použití



Neesterilizujte



Upozornění

EC REP

Autorizovaný zástupce v EU

Číslo šarže

STERILE EO

Sterilizováno ethylenoxidem



Udržujte v suchu



Obsahuje ftaláty (pouze PVC drén)



Bez latexu

VARIVAC™

International Medical Research Pty Ltd
Unit 5, 10 Whipple St. Balcatta,
WA 6021, Australia

www.varivac.com

UPOZORNĚNÍ

1. Skladujte v suchu a chladu.
2. Před použitím zařízení věnujte pozornost návodu k použití.
3. Ujistěte se, že používáte konektor správné velikosti, abyste zabránili špatnému připojení a netěsnosti.
4. Pouze na jedno použití - nepoužívejte opakovaně, jinak může dojít ke křížové kontaminaci.
5. Vyhýbejte se ostrým nástrojem.
6. Nežádoucí příchody hlase výrobci.
7. Likvidace podle nemocničního protokolu.

Ireland,



CE 0482